

SYSTEM
STROBEL
GMBH & CO. KG
RETTUNGSFAHRZEUGE

Handbuch

SYSTEM **STROBEL** - Beladerampe

Für künftige Verwendung aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
2 Sicherheit.....	3
3 Übersicht.....	4
3.1 Verwendung und Leistungsbeschreibung.....	4
3.2 Technische Daten.....	4
4 Bedienelemente der Beladerampe.....	5
4.1 Bezeichnungen.....	5
4.2 Gesamtübersicht.....	5
5 Bedienung.....	6
5.1 Beladerampe ausklappen.....	6
5.2 Tragestuhl be- und entladen.....	8
5.3 Beladerampe einklappen.....	8
6 Pflege und Wartung.....	9
7 Service.....	9

1 Allgemeines

In diesem Handbuch werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:



Vorsicht!

Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von leichten Verletzungen und Sachschäden an der Beladerampe werden mit dem dargestellten Piktogramm und dem fett gestellten Wort Vorsicht gekennzeichnet.



Achtung!

Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von Sachschäden an der Beladerampe werden mit dem dargestellten Piktogramm und dem fett gestellten Wort Achtung gekennzeichnet.



Tipp

Hinweise und Tipps zur Bedienung der Beladerampe werden mit dem dargestellten Piktogramm und dem fett gestellten Wort Tipp gekennzeichnet.

2 Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **SYSTEM STROBEL** – Beladerampe für Krankentransportwagen ist ausschließlich für die in Kapitel 3.1 beschriebene Verwendung vorgesehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Beladerampe gehört auch das Lesen dieses Handbuchs und das Beachten der darin enthaltenen Angaben zu:

- Bedienung
- Wartung und Pflege

Verändern Sie die Beladerampe nicht, um sie anderen Verwendungen zu erschließen, sonst erlischt Ihr Garantieanspruch.

3 Übersicht

3.1 Verwendung und Leistungsbeschreibung

Die **SYSTEM STROBEL**-Beladerampe wurde für den Einsatz in Krankentransportwagen entwickelt. Die Beladerampe dient zum bequemen Be- und Entladen eines Tragestuhls.

Mit der **SYSTEM STROBEL**-Beladerampe können unterschiedliche Tragestühle be- und entladen werden.

3.2 Technische Daten

Maximales Beladegewicht	250,0 kg
Eigengewicht	42,5 kg

4 Bedienelemente der Beladerampe

4.1 Bezeichnungen

In diesem Handbuch werden Richtungsangaben im Zusammenhang mit dem Rettungswagen immer in Fahrtrichtung angegeben.

- Rechts bedeutet in Fahrtrichtung rechts.
- Links bedeutet in Fahrtrichtung links.

Ihre Position im Rettungswagen bzw. Ihre Blickrichtung ist dabei nicht entscheidend.

4.2 Gesamtübersicht



Abbildung 1: Gesamtübersicht der Beladerampe (eingeklappt)

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Entriegelung der Beladerampe	Entriegeln der Beladerampe
2	Griffe unten	Zum Aus- und Einklappen
3	Griffe oben	Zum Aus- und Einklappen
4	Anschlage oben	Aufnahme für Beladerampe
5	Anfahrkeil	Bodenaufgabe der Beladerampe

5 Bedienung

5.1 Beladerampe ausklappen

Achtung!



Sie benötigen zum Ausklappen der Beladerampe und dem Be- und Entladen eines Tragestuhls eine Rangierabstand von mindestens 4 Meter! Benutzen Sie die Beladerampe auf möglichst ebenem und festem Untergrund! Die Beladerampe muss im ausgeklappten Zustand rechts und links gleichmäßig aufliegen!

So klappen Sie die Beladerampe aus:

1. Öffnen Sie die Hecktüren des Krankentransportwagens.
2. Greifen Sie die Beladerampe an einem der unteren Griffe.
3. Entriegeln Sie die Beladerampe, indem Sie die Entriegelung ziehen (siehe Abb. 1 auf Seite 5, Positionsnr.1).

Achtung!



Klappen Sie die Beladerampe nicht an den oberen Griffen nach unten! Die Kunststoffabdeckung des Fahrzeuges kann beschädigt werden, wenn die Beladerampe nicht entriegelt ist, da der untere Teil der Beladerampe in diesem Fall nicht ausklappt.

4. Klappen Sie die Beladerampe an den unteren Griffen heraus und legen Sie diese mit den Anfahrkeilen flach auf den Boden auf. (siehe Abb. 2 und 3 Auf Seite 7)

↪ Die Beladerampe ist ausgeklappt.



Abbildung 2: Ansicht der Beladerampe (Ausklappvorgang)



Abbildung 3: Ansicht der Beladerampe (ausgeklappt)

5.2 Tragestuhl be- und entladen



Vorsicht!

Das Be- und Entladen des Patienten im Tragesessel ist nur durch 2 eingewiesene Personen zulässig.



Vorsicht!

Vor Benutzung des Tragestuhls lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung / Handbücher des entsprechenden Gerätes und machen sich mit dem Umgang des Tragestuhls vertraut.

Der Tragestuhl wird über die Beladerampe geführt bzw. geschoben und je nach Typ des Tragestuhls mit der entsprechenden Bodenhalterung fixiert.

5.3 Beladerampe einklappen

So klappen Sie die Beladerampe ein:

1. Greifen Sie die Beladerampe an einem der unteren Griffe und heben Sie die Beladerampe an.
2. Greifen Sie die Beladerampe an einem der oberen Griffe und klappen Sie die Beladerampe zusammen.
3. Führen Sie die Beladerampe in die eingeklappte Position (siehe Abb. 1 auf Seite 5). Die Beladerampe wird automatisch nach innen gezogen.
4. Achten Sie darauf, dass die Entriegelung (siehe Abb. 1 auf Seite 5, Positionsnr. 1) geschlossen ist. Drücken Sie die Beladerampe ggf. über den rechten unteren Griff leicht an.

↪ Die Beladerampe ist eingeklappt.

6 Pflege und Wartung

Desinfizieren Sie alle Flächen der Beladerampe regelmäßig mit alkoholfreiem Desinfektionsmittel und neutralen Reinigungsmitteln.

Die **SYSTEM STROBEL** - Beladerampe für Krankentransportwagen ist 14-tägig an allen Gelenkpunkten mit einem säurefreiem Öl zu schmieren.



Vorsicht!

Reparaturen an der Beladerampe dürfen nur von dafür ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Nicht dafür ausgebildete Personen können sich verletzen oder Schäden an der Beladerampe verursachen.

7 Service

Sie können unseren Service werktags von

7.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr

unter der Telefonnummer **07 361 / 97 87 – 0** erreichen.